

# Arbeitsanleitung

## Aufbereitung von Feuchttuchspendern

Vor jeder Wiederbefüllung der Feuchttuchspender ist eine vorbeugende Reinigung und Desinfektion erforderlich. Zur Befüllung und Aufbereitung des Feuchttuchspenders und im Umgang mit Desinfektionsmitteln sind geltende Regeln des Personalschutzes zu beachten und geeignete Schutzausrüstung zu tragen (siehe BGR 250 / BGR 195 / BGR 206; Infos unter [www.bgw-online.de](http://www.bgw-online.de)). Die VAH-Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränkssystem für die Flächendesinfektion<sup>1</sup> und die Mitteilung der VAH „Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil“<sup>2</sup> sind zu beachten. Im Falle eines

mikrobiologischen Befundes sind neben der Aufbereitung auch die Befüllung, Anwendung und ggf. weitere Parameter als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen und zu überprüfen.

<sup>1</sup> Hyg Med 37. Jahrgang 2012, Mitteilung 3/2012 Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränkssystem für die Flächendesinfektion

<sup>2</sup> Hyg Med 38. Jahrgang 2013, Mitteilung 1/2013 Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil



### REINIGUNG ①

Innenseiten und Rand des neuen oder restleeren Spenders mit dem Reinigungstuch gründlich reinigen.

① Reinigungsschritt

Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen.

② Reinigungsschritt

Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich reinigen.

③ Reinigungsschritt



Feuchttuchspender und Deckel mindestens 10 Min. abtrocknen lassen, um eine vollständige Trocknung zu gewährleisten.

### DESINFEKTION ②

Innenseiten und Rand des Spenders mit dem Desinfektionstuch gründlich abwischen.


① Desinfektionsschritt

Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich abwischen.

② Desinfektionsschritt

Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich abwischen.

③ Desinfektionsschritt

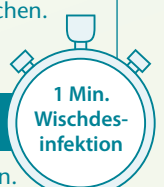

Spender und Deckel vollständig abtrocknen lassen. Anschließend Feuchttuchspendersystem gemäß der Befüllanleitung befüllen.