

Arbeitsanleitung

Befüllung von DESOFLEX System

Bei der Verwendung von Feuchttuchspendern zur Flächendesinfektion sind die grundsätzlichen hygienischen Standards zu berücksichtigen. Zum Arbeitsschutz des Anwenders empfehlen wir, chemikaliendichte Schutzhandschuhe zu tragen.

Zur Befüllung mit Desinfektionsmittel

- geeignet zur Verwendung in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko
- einfache, schnelle und hygienische Anwendung
- optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche
- kurze Wartezeit durch das konzentrierte Tränken der Tuchrolle von innen nach außen

Wir empfehlen die folgenden Produkte, bei deren korrekter Handhabung eine Standzeit von 42 Tagen erreicht werden kann. BIGUAMED® PLUS, BIGUAMED® PERFEKT N, DESOMED® RAPID AF, DESOMED® RAPID FORTE und DESOTOP.

<p>①</p> <p>Entnahmelasche hochziehen und Membran entfernen.</p>	<p>②</p> <p>Sternförmige Membran herausziehen und entsorgen.</p>	<p>③</p> <p>Die bereits enthaltene Vliestuchrolle mit 2,5 L gebrauchsfertiger Desinfektionsmittellösung tränken.</p>
<p>④</p> <p>Das erste Tuch durch die sternförmige Entnahmeöffnung ziehen.</p>	<p>⑤</p> <p>Nach 15 Minuten Einwirkzeit können die Tücher benutzt werden. Den Beutel mit den Ansatzinformationen vollständig beschriften. Wichtig: Nach jedem Gebrauch Spender wieder verschließen.</p>	<p>⑥</p> <p>Einwegsystem! Eventuelle Restflüssigkeit entsorgen, den Spender mit offenem Deckel zusammenpressen und dem Recycling zuführen.</p>