

Arbeitsanleitung

Befüllung von Feuchttuchspendern

Bei der Verwendung von Feuchttuchspendern zur Flächendesinfektion sind die grundsätzlichen hygienischen Standards zu berücksichtigen. Zum Arbeitsschutz des Anwenders sowie zum Schutz der Vliesrolle vor Kontamination chemikaliendichte Schutzhandschuhe tragen.

Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmitteln.

Mit den folgenden DESOMED Flächendesinfektionsmitteln wurde eine Standzeit von 28 Tagen bestätigt:
BIGUAMED® PLUS, BIGUAMED® PERFEKT N, DESOMED® RAPID AF, DESOMED® RAPID FORTE, DESOMED RAPID UNIVERSAL und DESOTOP.

①



Deckel des Feuchttuchspenders entfernen und mit der Außenseite auf der Arbeitsfläche ablegen.

②



Trockene Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in den Spender einsetzen.
Alternative: Bereits vorgetränkte Tücher mit dem Beutel einsetzen und mit Schritt 4 fortfahren.

③




Desinfektionsmittellösung langsam und spiralförmig über die Vliestuchrolle in den Spender füllen.

Dosieranleitung

Blatt/Rolle	50	100
Lösung	1,5 L	3 L

④

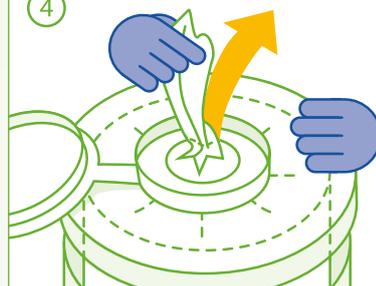


Erstes Vliestuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen und den vorderen Teil des Tuches durch das sternförmige Entnahmesystem führen.

⑤




Feuchttuchspender fest verschließen. Das erste Tuch verwerfen.

⑥

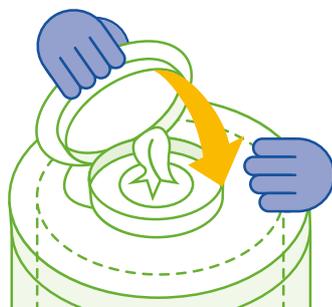

Beim Schließen der Entnahmeöffnung darauf achten, dass das herausgezogene Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen ist.

⑦

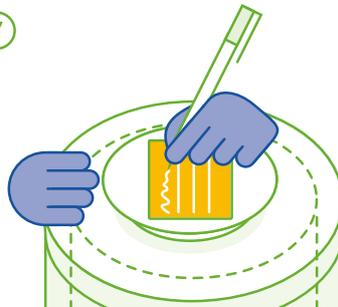

Beigefügtes Deckeletikett mit den Ansatzinformationen vollständig ausfüllen und auf dem Deckel anbringen.

⑧



Nach 30 Minuten sind die Tücher einsatzbereit.