

DOSIERTABELLE

Liter Lösung	Konzentrat in Prozent						
	0,25 %	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	3 %	4 %
1 L	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml
2 L	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml
3 L	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml
4 L	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml
5 L	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml
8 L	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml
10 L	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml
16 L	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	480 ml	640 ml
20 L	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml

Herstellung gebrauchsfertiger Desinfektionslösungen: Fügen Sie zunächst Wasser, dann das Konzentrat für die entsprechende Lösungsmenge hinzu. Beispiel: Um 5 Liter einer 2 %igen Anwendungslösung herzustellen müssen 4,9 Liter Wasser mit 100 ml Konzentrat versetzt werden. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.