



# Desinfektionsplan Wohn- und Pflegebereich

## Hände und Fläche

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <b>Hände- desinfektion</b>	<b>Händedesinfektion hygienisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Arbeitsbeginn.</li> <li>• Nach Arbeitsende.</li> <li>• Vor und nach Bewohnerkontakt.</li> <li>• Nach Kontakt mit der unmittelbaren Bewohnerumgebung.</li> <li>• Nach Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material.</li> <li>• Vor aseptischen Arbeiten (wie z. B. Vorbereitung von Medikamenten und Infusionen).</li> <li>• Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen.</li> </ul>	ASEPTOMAN <sup>®</sup> PRO	30 Sekunden	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende
 <b>Fläche</b>	<b>Spender Bedienhebel, Auslauf, Gehäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Routine mind. 1x wöchentlich.</li> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> </ul>	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Auch Auslauf desinfizierend reinigen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup>
			Biguamed Plus	1% – 60 Minuten		
	<b>Spender Innenaufbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entsprechend den Angaben im Hygienehandbuch.</li> </ul>			Herstellerangaben beachten.	Mitarbeitende in der Pflege
	<b>Medizin./techn. Geräte z. B. Stethoskop, Ohrlöwen, Fieberthermometer, Blutdruckmanschetten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort nach Gebrauch.</li> </ul>	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup>
			Biguamed Plus	1% – 60 Minuten		
<b>Bewohnernahe Flächen z. B. Bettgestell, Nachttisch, Tische, Matratzenschutzbezug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> <li>• Bei Bewohnerwechsel.</li> </ul>	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL3	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup>	
		Biguamed Plus	1% – 60 Minuten			
<b>Häufige Kontaktflächen z. B. Tische, Stühle, Lichtschalter, Türgriffe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Täglich.</li> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> </ul>	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup>	
		Biguamed Plus	1% – 60 Minuten			

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

# Desinfektionsplan Wohn- und Pflegebereich

## Fläche

Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <b>Arbeitsflächen z. B. Flächen zum Stellen von Medikamenten</b>	· Vor der Nutzung.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL <sup>3</sup>	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>3</sup> _____ _____
		Biguamed Plus	1% – 60 Minuten		
<b>Inventar z. B. Schränke, Ablagen, Wandfliesen</b>	· Direkt bei Kontamination.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL <sup>3</sup>	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>3</sup> _____ _____
		Biguamed Plus	1% – 60 Minuten		
<b>Lagerungshilfen</b>	· Direkt bei Kontamination. · Bei Bewohnerwechsel.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>3</sup> _____ _____
		Biguamed Plus	1% – 60 Minuten		
<b>Rollstühle, Gehwagen, Toilettenstühle</b>	· Bewohnerbezogen: Wöchentlich. · Direkt bei Kontamination. · Nicht Bewohnerbezogen: Sofort nach Gebrauch.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>3</sup> _____ _____
		Biguamed Plus	1% – 60 Minuten		
<b>Waschbecken und Armaturen Spülbecken</b>	· Direkt bei Kontamination.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>3</sup> _____ _____
		Biguamed Plus	1% – 60 Minuten		
<b>Dusche, Badewanne, Duschstuhl, Lifter</b>	· Sofort nach Gebrauch.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung gründlich mit Wasser abspülen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>3</sup> _____ _____
		Biguamed Plus	1% – 60 Minuten		

<sup>3</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>4</sup> Fläche vor der Desinfektion trocknen.

# Desinfektionsplan Wohn- und Pflegebereich

## Fläche



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Waschschüsseln, Fußwannen	· Sofort nach Gebrauch.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL _____ Biguamed Plus _____	3 Minuten _____ 1% – 60 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung gründlich mit Wasser abspülen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup> _____ _____
Steckbecken, Urinflaschen	· Sofort nach Gebrauch.			Chemothermische Aufbereitung/Thermische Aufbereitung. Angaben der Gerätehersteller beachten.	Mitarbeitende in der Pflege _____ _____
Medikamentendose, Medikamentenkörbe, Injektionstablett	· Sofort nach Gebrauch.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL _____ Biguamed Plus _____	3 Minuten _____ 1% – 60 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup> _____ _____
Transportwagen z. B. Verband- / Notfall- / Pflegetwagen	· Direkt bei Kontamination.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL _____ Biguamed Plus _____	3 Minuten _____ 1% – 60 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup> _____ _____
Fußboden	· Direkt bei Kontamination.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL _____ Biguamed Plus _____	3 Minuten _____ 1% – 60 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup> _____ _____
Abfallbehälter	· Direkt bei Kontamination. · Abfall täglich entsorgen.	DESOSurFIX <sup>®</sup> WIPES/WIPES XL _____ Biguamed Plus _____	3 Minuten _____ 1% – 60 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder einhalten.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup> _____ _____

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>3</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.

# Desinfektionsplan Wohn- und Pflegebereich

## Sonstiges

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Sonstiges	<b>Geschirr</b>	· Sofort nach Gebrauch.			Geschirr unverzüglich zur Spülmaschine transportieren. Routinemäßig reinigen (bevorzugt maschinell bei mind. 65°C).	Mitarbeitende in der Pflege _____ _____
	<b>Schutzkleidung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Geeigneter Schutzkittel (DIN EN 14126) mit gut abschließendem Bündchen, flüssigkeitsdicht und strapazierfähig, die Körpervorderseite des Trägers bedeckend, wenn mit Kontamination, Durchfeuchtung der Arme und Arbeitskleidung zu rechnen ist. Ggf. zusätzlich flüssigkeitsdichte Schutzschürze.</li> <li>· Einmalhandschuhe: Bei möglichem Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material, Gegenständen, Geräten, Instrumenten.</li> <li>· Mund-Nasen-Schutz: Bei möglichem Kontakt mit Aerosolen, zum Schutz vor der Berührung von Mund und Nase mit kontaminierten Händen.</li> </ul>			Schutzkleidung über die Dienstkleidung/Arbeitskleidung anziehen. Nach Nutzung in Wäschetransportbehältern/-säcken sammeln und der Wäscheaufbereitung zuführen. Einmalschutzkleidung wird dem Abfall zugeführt.	Alle Mitarbeitende _____ _____

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im D-WIPES TUCHSPENDERSYSTEM eingesetzt werden.

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>2</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im D-WIPES TUCHSPENDERSYSTEM eingesetzt werden. Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen, müssen nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachbehandelt werden (Ausnahme: DESOsurFIX® WIPES). Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift