



VAH & IHO



DESOSurFIX WIPES XL

Vorgetränktes Einweg-Vliestuchspendersystem

- Begrenzt viruzid PLUS innerhalb 3 Min.
- Sehr gute Materialverträglichkeit*
- Besonders geeignet zur Desinfektion großer Flächen



Produktbeschreibung

DESOSurFIX WIPES XL eignen sich insbesondere für die schonende Desinfektion und Reinigung großer empfindlicher Flächen. Die vorgetränkten Tücher zur Schnelldesinfektion stehen gebrauchsfertig in einem stabilen und handlichen Einweg-Standbodenbeutel zur Verfügung. Der Einmalgebrauch spart Arbeitszeit, die bei Mehrwegsystemen u. a. für die Tränkung separater Tücher und die Aufbereitung des Spendereimers anfällt. Die praktischen Tücher im Format 17,5 x 36 cm überzeugen in der Routine sowie im Ausbruchsfall mit behüllten und unbehüllten Viren wie z. B. Corona- und Noroviren. DESOSurFIX WIPES XL minimieren mit ihrer einfachen Handhabung potenzielle Anwenderfehler.

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in bewohnernaher Umgebung. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht-invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion			30 s	1 min	2 min	3 min
bakterizid*, levurozid*	VAH**/EN***	mit Mechanik, hohe Belastung			•	
tuberkulozid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•		
mykobakterizid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•	
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung			•	
		hohe Belastung				•
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•		

Ergänzende Prüfergebnisse			30 s	1 min	2 min	3 min
bakterizid	EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			•	
	EN 13727	hohe Belastung		•		
	EN 1276	hohe Belastung	•			
levurozid	EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			•	
	EN 13624	hohe Belastung		•		
	EN 1650	hohe Belastung	•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung			•	
		hohe Belastung				•
wirksam gegen Noroviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•		
wirksam gegen Vacciniaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•			
wirksam gegen Coronaviren	EN 14476	hohe Belastung	•			

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)
 ** VAH-gelistet 5 Min.-Wert
 *** EN 13624, EN 13727, EN 16615

*s. Materialverträglichkeit auf Seite 2

DE 10/2024



Die exklusive Marken-Vertriebspartnerschaft der GVS Group mit der Dr. Schumacher GmbH
Dr. Schumacher GmbH
 Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany
 P +49 5664 9496-0 · www.schumacher-online.com



DESOSurFIX WIPES XL

Vorgetränktes Einweg-Vliestuchspendersystem

Anwendung

Flächen mit **DESOSurFIX WIPES XL** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 42 Tage.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Aluminium, Messing, Polymethylmethacrylat (PMMA).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	VE	Größe	Inhalt	Art. Nr.	GVS-Art.-Nr.
DESOSurFIX WIPES XL	Vliestuchspender	4	17,5 x 36 cm	120 Blatt	5-15-T120	45700003

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die GVS-Art.-Nr. beziehen sich jeweils auf Einzelgebinde.

Die Verfügbarkeit der Produkte und Gebinde ist abhängig von einer erfolgten nationalen Registrierung.

CE 0482

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

