



BIGUAMED® PLUS

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- Umfassendes Wirkspektrum
- Universell einsetzbar
- Ideal für Routineanwendungen



Produktbeschreibung

BIGUAMED PLUS ist ein flüssiges Konzentrat für die Desinfektion und Reinigung von Flächen. Das Konzentrat lässt sich universell einsetzen, darunter auch zum Desinfizieren und Reinigen patientennaher Flächen sowie von nichtinvasiven Medizinprodukten. Das Konzentrat überzeugt mit seiner hohen Reinigungsleistung. **BIGUAMED PLUS** wirkt gegen alle behüllten Viren (HBV, HIV, HCV) und verfügt darüber hinaus über eine ausgezeichnete Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren wie Adeno-, Noro- und Rotaviren. Gebrauchslösungen mit dem geruchsneutralen und parfümfreien **BIGUAMED PLUS** trocknen streifenfrei ab.

Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in medizinischen, industriellen, privaten und öffentlichen Bereichen.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			5 min	15 min	30 min	60 min	240 min
Bakterien und Hefen							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	2,5%	1,5%	1%	0,5%	
tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	hohe Belastung				1,5%	
		niedrige Belastung					0,5%
fungizid (Aspergillus brasiliensis)	VAH	hohe Belastung				3%	
Viren							
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hohe und niedrige Belastung			2%	1%	
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	1%			0,5%	
	EN 14476	hohe und niedrige Belastung				0,5%	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung	2%	1%		0,5%	
		hohe Belastung	2%	1%			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung		2%		1%	
		hohe Belastung			2%	1%	
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	0,5%				
Ergänzende Prüfergebnisse			1 min	5 min	60 min	240 min	
bakterizid (medizinischer Bereich)	EN 13727	hohe Belastung		0,25%			
levurozid (C. albicans) (medizinischer Bereich)	EN 13624	hohe Belastung		0,25%			

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



BIGUAMED PLUS

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung



Anwendung

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten **BIGUAMED PLUS** Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

BIGUAMED PLUS nicht direkt in Verbindung mit aldehydhaltigen Produkten verwenden.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

6,6 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,

2,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid,

7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):

Enthält < 5 % nichtionische Tenside.

Materialverträglichkeit

Verträglich mit Metallen, Buntmetallen, Bodenmaterialien wie PVC, Kacheln Fliesen uva. sowie Kunststoffen (PMMA, POM, PP, PE, PA, PS), Gummi und Silikon. Nicht zu verwenden auf Materialien wie Polycarbonat, sowie porösen Materialien wie unbe-

handelten oder lackierten Holzoberflächen.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	GVS-Art.-Nr.
BIGUAMED PLUS	Sachet	25 x 20 ml	20 ml	6-16-0002	45700004
	Flasche	10 x 1 L	1L	6-16-010	45700001*
	Kanister	3 x 5 L	5L	6-16-050	45700002*

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Die GVS-Art.-Nr. beziehen sich jeweils auf Einzelgebinde.

CE 0482

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

